


ENNEN TUTKIMUSTA


1. Täytä potilaan ja mittauksen tiedot valmiiksi jos mahdollista
2. Liitä oirekartoitusslomake potilastietoihin




CTS -TUTKIMUSPROSESSI

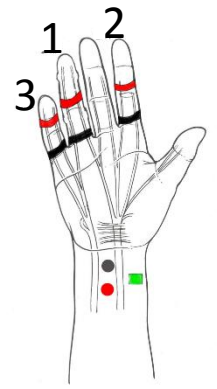


1. Pese kädet

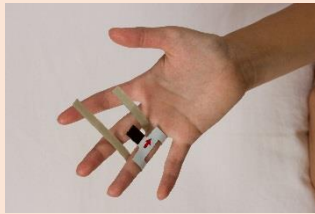

2. Kiinnitä stimulaatioelektrodi nimettömään

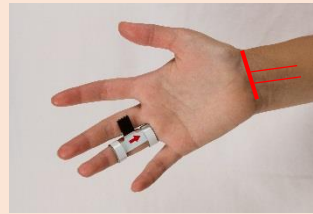

3. Paikanna rannepoimu

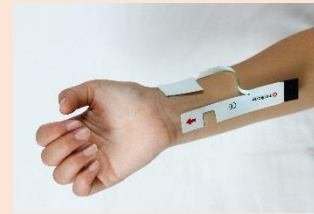


4. Kiinnitä rekisteröintielektrodi




5. Kiinnitä elektrodit laitteeseen ja rentouta asento



6. Etsi stimulaatiotasoa ja aloita mittaus

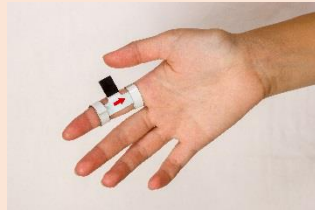


7. Toista mittaus etusormesta

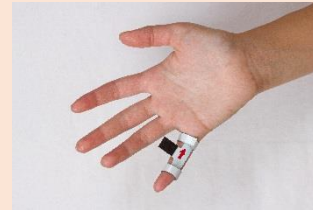

8. Toista mittaus pikkusormesta



9. Muokkaa mittaustuloksia

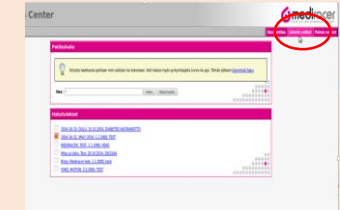

10. Lähetä tulokset lausuttaviksi